

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN : 70744000

刀-KATANA-

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化品は使用しないこと。


【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕(**)

タングステンカーバイド製の作業部と軸部より構成される。

最高回転数：3 万 rpm

※印は 1 万 rpm

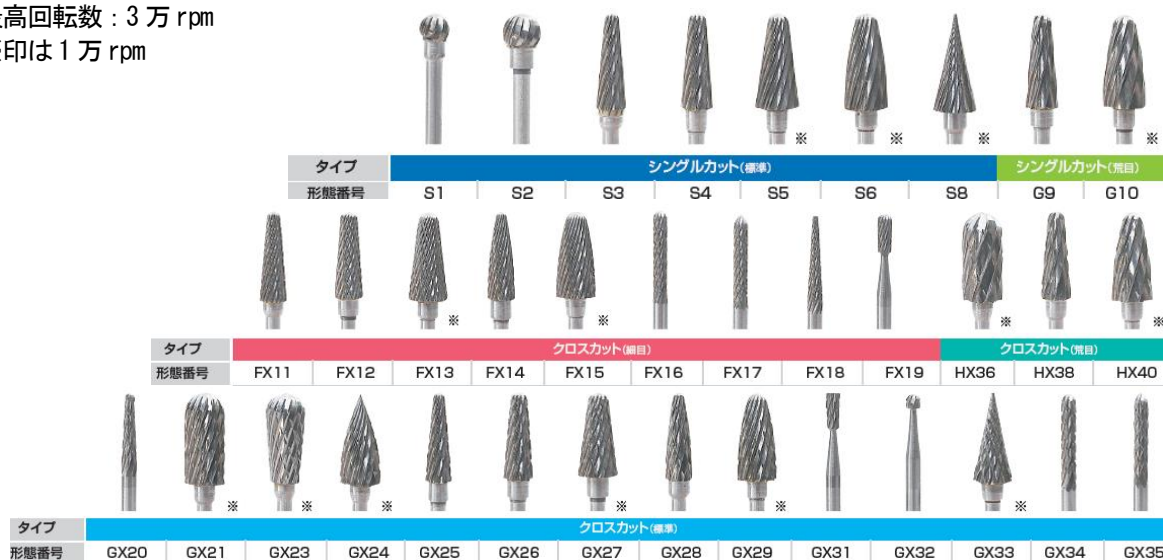

【原理】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【包装】

1 ケース (1 本入り)

【使用目的又は効果】(*)

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用方法等】(*)

歯科技工用ハンドピースに装着し、回転する事によって、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削する。

【使用上の注意】

- ・シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。

- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・軸にゆがみがあるものは使用しないこと。(**)
- ・使用前にブレがないかを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】(*)

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
T E L	052-805-1181
外国製造業者	ビー・エイ・メディカル・プロダクツ カンパニーリミテッド B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. 中国