

添付文書

歯 09 歯科用研削材料

一般医療機器

歯科技工用カーバイド切削器具

JMDN : 70744000

剣 - T S U R U G I -

【禁忌・禁止】


破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕

タングステンカーバイド製の作業部とステンレスの軸部より構成される。(最高回転数 : 3 万 rpm)

ラウンド型

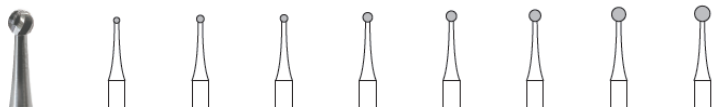

形態番号

1

2

3

4


5

6

7

8

フラットエンドテーパフィッシャー型

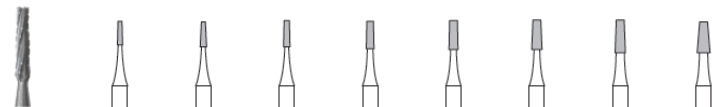

形態番号

698

699

700

701


702

703

704

705

フラットエンドテーパ型

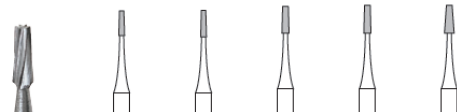

形態番号

169


170

171

172

173

フラットエンドテーパフィッシャー型

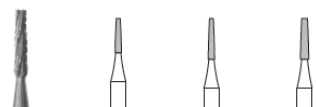

形態番号

699L

700L

701L

インバーテッドコーン型



形態番号


34

35

37

39

フラットエンドフィッシャー型

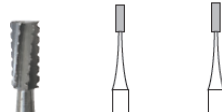

形態番号

558

559

ラウンドエンドフィッシャー型



形態番号

1557

1558

【原理】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【包装】

1 ケース (5 本入り)

【使用目的又は効果】(*)

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用方法等】(*)

歯科技工用ハンドピースに装着し、回転する事によって、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削する。

【使用上の注意】

・シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。

- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・軸にゆがみがあるものは、使用しないこと。(***)
- ・使用前にブレがないかを確認すること。(**)

【保管方法及び有効期間等】(*)

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ
カンパニーリミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS
CO., LTD.
国名 中国