

添付文書

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレジブ研削器具 JMDN : 70901000

ファイバーカッティングディスク アルミナ

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】



直径 25mm×厚さ 0.3mm

直径 35mm×厚さ 0.5mm

【原理】

グラスファイバーにアルミニウムオキサイドを主原料としたアルミナを塗布した薄い円盤状砥石であり、歯科技工物の研削に用いる。

【包装】

1 ケース 5 枚入

【使用目的又は効果】(***)

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。
ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

【使用方法等】

歯科用マンドレルに取り付け、歯科技工用エンジンに装着して使用する。

【使用上の注意】

- ・歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- ・シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- ・必ず右回転で使用する。
- ・使用前に予備回転を行い、振れはないことを確認すること。
- ・無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ・使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・木材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・変形・損傷等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

販売元	(株) ピーディーアール
住所	愛知県名古屋市天白区原 4-106
T E L	052-846-2718
製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
T E L	052-805-1181
外国製造業者	インターデンタル アルアンドデー センター カンパニー リミテッド INTER-DENTAL R&D CENTER CO., LTD
国名	韓国