

添付文書
器 35 医療用はさみ
一般医療機器 歯科用歯肉はさみ JMDN : 31822000

デリケートシザーズ

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品は歯科手術用に使い、2 枚の刃及び把持部から構成され、形状の違いによりデリケートシザーズ A・B・C・D の 4 種がある。

			
デリケートシザーズ A （刃先直） 全長 114mm	デリケートシザーズ B （刃先反り） 全長 113mm	デリケートシザーズ C （刃先曲） 全長 112mm	デリケートシザーズ D （刃先直曲） 全長 113mm

【原理】（**）

歯科手術用に特別に設計された器具をいう。

【包装】

1 袋（1 本入）

【使用目的又は効果】（*）

本品は歯肉の切離や切除等といった歯科手術に用いる。

【使用方法等】（*）

- ①使用前に滅菌済み（オートクレーブ滅菌 133℃）であることを確認する。
- ②本品の先端を歯肉にあてて 2 枚の刃で、歯肉を切断する。
- ③使用後は洗浄・滅菌（オートクレーブ滅菌 133℃）を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は使用前に必ず滅菌を行うこと。（オートクレーブ滅菌 133℃）
- ・製品に損傷・変形等の異常が見られる場合は使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】（*）

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
T E L	052-805-1181
外国製造業者	シアルコット サージデント インダストリーズ Sialkot Surgident Industries
国名	パキスタン