

添付文書
器 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN : 31814000

コーク型ピンセット NEO


【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

2つの先細のバネ性先端部をもち、この先端部を近接させて(閉じて)、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる、歯科手用器具である。

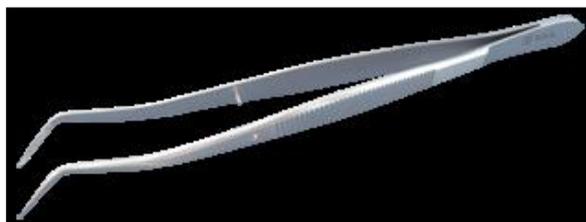

※先端ギザなし

【原理】(**)

2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手用器具をいう。この先端部を近接させて(閉じて)、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【包装】

1袋(1本入)

【使用目的又は効果】(*)

本品は、2つの先細のバネ性先端部を閉じて、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる。

【使用方法等】(*)

- ①使用前に滅菌済み(オートクレーブ滅菌 133℃)であることを確認する。
- ②2つの先細のバネ性先端部を閉じて、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用上の注意】

- ・製品に損傷・変形等の異常が見られる場合は使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・本品は使用前に必ず滅菌を行うこと。(オートクレーブ滅菌 133℃)

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 シアルコット サージデント インダストリーズ
Sialkot Surgident Industries
国名 パキスタン