

添付文書

歯 08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用硬質石膏 JMDN : 70897020

ドクタープラスター スーパーハード

【禁忌・禁止】

本品を取り扱う際は、目に入らないよう十分に注意して取り扱うこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

性状	粉末
成分	硫酸カルシウム半水塩、その他



【原理】

本品は加水し練和すると水和硬化する。

【物理的性質】（＊）

混水量	20%	硬化時間	11 分
色調	ゴールドブラウン	凝結膨張	0.08%
攪拌時間	30～60 秒	圧縮強度	60Mpa（1 時間後）
作業時間	7 分	圧縮強度	110Mpa（24 時間後）

【包装】

1 袋（1.5kg）
1 カートン（1.5kg 袋 × 12）

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石膏をいう。

【使用方法等】＊

- ①標準混水量 20ml に対し本品 100g を徐々に散布する。
 - ②30 秒ほど置いたのち、30～60 秒攪拌する。
 - ③型枠に石膏混合物を注入する。（この際、パイプレーターを使用すると気泡の少ない滑沢な模型になる。）
 - ④注入から 30 分経過後、石膏模型を分離する。
- 【推奨環境】 水温：15～20℃ 室温：15～20℃

【使用上の注意】

1) 重要な注意事項

- ・本品が目に入らないように十分に注意すること。目に入った場合にはただちに大量の流水で洗い流し、眼科医の診察を受けること。

2) 使用上の注意事項

- ・本品を扱う場合には、粉じんの吸入による人体への悪影響をさけるため、吸塵装置や防塵マスクなどを使用すること。
- ・本品が硬化後に研磨・切削を行う場合には、飛散した破片等による目の負傷を避けるため、保護メガネなどを使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管すること
- ・開封後は密封して保管すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 インターデンタル フール アンド デイ
センター カンパニー リミテッド
INTER-Dental R&D CENTER
Co., Ltd
国名 韓国