

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN：16184000

再使用禁止。

BSA プロフィーカップ

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品は、シリコンのカップ部分と銅製の軸部から構成される。形状により 4 種類ある。（使用回転数：800～1200rpm）



【原理】

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる、通常ゴム製の器具をいう。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【原材料】（**）

カップ部：シリコン

【包装】

プロフィーカップ #1 （スクリュータイプ ブルー・レギュラー）	1 ケース（12 本）
プロフィーカップ #2 （スクリュータイプ グリーン・ソフト）	1 ケース（12 本）
プロフィーカップ #3 （CA タイプ ブルー・レギュラー）	1 ケース（12 本）
プロフィーカップ #4 （CA タイプ グリーン・ソフト）	1 ケース（12 本）

【使用目的又は効果】（*）

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる、通常、ゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】（*）

- ①研磨部位によってプロフィーカップの種類を選択する。
- ②使用するコントラハンドピースによって、CAタイプ、スクリュータイプを選択する。
- ③プロフィーカップに研磨用ペーストをつける。
- ④プロフィーカップを歯に軽く押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・再使用禁止。
- ・シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
- ・本品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・破損等の恐れがあるため、使用回転数を超えて使用しないこと。
- ・使用前にハンドピースに装着して、ブレが無いかを確認すること。
- ・使用時に無理な力を加えないこと。（破損や怪我につながる恐れがある。）
- ・スクリュータイプはモーターを逆回転（左回転）すると外れてしまうため、逆回転で使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】（*）

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイチ・メディカル・プロダクツ・カンパニー・リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS
CO., LTD.
国名 中国