

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN：35768000

再使用禁止。

BSA プロフィーブラシ

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品は、ナイロン製のブラシ部分と銅製の軸部から構成される。形状により 6 種類ある。（使用回転数：800～1200rpm）



【原理】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

【原材料】（**）

ブラシ部：ナイロン

【包装】

プロフィーブラシ #5 (スクリュータイプ フラット)	1 袋 (12 本入)
プロフィーブラシ #6 (スクリュータイプ ポイント)	1 袋 (12 本入)
プロフィーブラシ #7 (CAタイプ フラット)	1 袋 (12 本入)
プロフィーブラシ #8 (CAタイプ ポイント)	1 袋 (12 本入)
プロフィーブラシ #9 (CAタイプ ミニ)	1 袋 (12 本入)
プロフィーブラシ #10 (CAタイプ ラージ)	1 袋 (12 本入)

【使用目的又は効果】（*）

ブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨のために用いる。

【使用方法等】（*）

- ・①研磨部位によってプロフィーブラシの種類を選択する。
- ②使用するコントラハンドピースによって、CAタイプ、スクリュータイプを選択する。
- ③プロフィーブラシに研磨用ペーストをつける。
- ④プロフィーブラシを歯に軽く押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・再使用禁止。
- ・シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
- ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・破損等の恐れがあるため、使用回転数を超えて使用しないこと。
- ・使用前にハンドピースに装着して、ブレが無いことを確認すること。
- ・使用時に無理な力を加えないこと。（破損や怪我につながる恐れがある。）
- ・スクリュータイプはモーターを逆回転（左回転）すると外れてしまうため、逆回転で使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】（*）

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー・リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS
CO., LTD.
国名 中国