

添付文書
器 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN : 31814000

エンドツイザー

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕（**）

2つの先細のバネ性先端部で構成される手持型器具である。



〔原理〕

2つの先細のバネ性先端部をもち、この先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる、歯科手術器具である。

〔包装〕

1 袋（1 本入）

【使用目的又は効果】（*）

本品は、2つの先細のバネ性先端部を閉じて、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる。

【使用方法等】（**）

- ①使用前に滅菌済み（オートクレーブ滅菌 133℃）であることを確認する。
- ②2つの先細のバネ性先端部を閉じて、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。（ピンセットの中ほどのロック部分を閉じるにより、ピンセットにしっかりと挟み込む。）

【使用上の注意】

- ・製品に損傷・変形等の異常が見られる場合は使用しないこと。
 - ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。
 - ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ・使用前に必ず洗浄・滅菌等を行うこと。
 - ・使用後は感染防止のため、洗浄・消毒又は滅菌を行うこと。
- （オートクレーブ滅菌 133℃以下）

【保管方法及び有効期間等】（*）

〔保管方法〕

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電話番号 052-805-1181
外国製造業者 シルクット サージデント インダストリーズ
Sialkot Surgident Industries
国名 パキスタン