

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

BSサーフェスミラー

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】(*)

〔形状・構造〕(**)

本品は、取り外し可能なミラートップであり、ミラーハンドルと接続して使用する。表面反射のみらーである。



〔原理〕(**)

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

〔原材料〕

ステンレス

〔包装〕

1 箱（12 本入り）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

【使用方法等】(**)

- ①使用前に、オートクレーブ滅菌を行う。(133℃以下)
滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②本品を、ミラーハンドルに接続する。
- ③ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。
- ④使用後、オートクレーブ滅菌を行う。(133℃以下)

【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 再使用する際は、オートクレーブ滅菌を行う。(**)

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	シアルコット サージデント インダストリーズ Sialkot Surgident Industries
国名	パキスタン