

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

BS ミラーハンドル

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

**【形状・構造】

本品（BSエイト）は、ねじ山式のミラーハンドルであり、先端にミラートップを接続して使用する。



*全長 128mm

【原理】

取り外し可能なミラーヘッド部及び本体ハンドル部から構成される手持型器具である。

【原材料】

真鍮

【包装】

1 袋（5 本入）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

**【使用方法等】

- ①使用前に、オートクレーブ滅菌を行う。（133℃以下）
滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②本品に、ミラートップを接続する。
- ③ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。
- ④使用後、オートクレーブ滅菌を行う。（133℃以下）

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。

**・再使用する際は、オートクレーブ滅菌を行う。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	シアルコット サージデント インダストリーズ Sialkot Surgident Industries
国名	パキスタン