

添付文書
歯03 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDN: 70832000

クイックトレー LC

【禁忌・禁止】

・本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある場合には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】(*)

本品は、プレート状に成型された光重合型のトレーレジンは、

形状、構造	成分
台形板状 (ピンク色)	ウレタンジメタクリレート、フィラー、PMMA等



サイズ: W10mm(狭い部分5mm)×70mm、厚さ2mm

【原理】

粉末及び液体の常温重合レジン、ペースト状で常温で硬化させるレジン又は熱可塑性レジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いるものをいう。

【包装】

1箱(50枚入)

【使用目的又は効果】

ペースト状で常温で光重合によって硬化させるレジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】(*)

- ①印象材のスペーサーとしてパラフィンワックスを模型に圧着する。
- ②その上から、本品を圧接する。
- ③余剰分をカットする。(余った部分は、ハンドル部や追加修正に使用する。)
- ④2～3分ほど仮重合させる。
- ⑤フィンガーレスト用のブロックを作成する。
- ⑥フィンガーレストを埋める。
- ⑦5分ほど光重合させる。
- ⑧温めたコンパウンドで辺縁形成を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は、歯科従事者以外は使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・本品使用後は、光に当たらないように保管すること。
- ・本品を高温となる場所に放置しないこと。
- ・本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品を直射日光の当たる場所や高温となる場所に放置しないこと。
- ・本品は、歯科従事者以外が触れないように、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 Bilkim Tibbi Urunler San. Ve Tic.
国名 トルコ