

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

F E E Dマウスミラー表面反射

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕（＊）

本品は、取り外し可能なミラートップであり、ミラーハンドルと接続して使用する。表面反射のみらーである。



〔原理〕（＊）

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

〔原材料〕

ステンレス

〔包装〕

1 箱（12 本入り）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

【使用方法等】（＊）

- ①使用前に、オートクレーブ滅菌を行う。（133℃以下）
滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②本品を、ミラーハンドルに接続する。
- ③ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。
- ④使用後、オートクレーブ滅菌を行う。（133℃以下）

【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 再使用する際は、オートクレーブ滅菌を行う。（＊）

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電話番号	052-805-1181
外国製造業者	シアルコット サージデント インダストリーズ Sialkot Surgident Industries
国名	パキスタン