

添付文書
歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN : 70891000

ミキシングチップ SS の再使用禁止

F E E D ガムシリコーン

【禁忌・禁止】

- ・本材はシリコンゴム製なので、発疹、皮膚炎などの過敏症がある場合は使用しないこと。
- ・本材は他の材料との混合使用禁止。
- ・ミキシングチップ SS の再使用禁止。（＊）

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

ベースとキャタリストから構成される。（＊）

構成品	形状
ベース	ピンク色のペースト状
キャタリスト	白色のペースト状

付属品；ミキシングチップ SS×6 本

【原理】

ベースとキャタリストを練和することにより成分が反応して硬化する。

【性能】（＊）

操作余裕時間	1 分 30 秒
硬化時間	5 分 30 秒
ショア A 硬度	43

（室内温度 23℃）

【包装】（＊）

カートリッジ（ベース 25ml、キャタリスト 25ml） ×2 本
ミキシングチップ SS ×6 本

【使用目的又は効果】（＊）

シリコン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、歯肉模型の作製に用いる。

【使用方法等】（＊）

- ①本材を、カートリッジディスペンサーにセットする。
- ②本材を押し出し、カートリッジ先端から本材が等量出ることを確認後、ミキシングチップ SS を装着し、必要量を練和する。（カートリッジ先端が硬化して等量が出てこない場合は探針等で硬化部分を取り除き、その後ミキシングチップ SS を装着する。）

【使用上の注意】

- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。
- ・口腔内で使用しないこと。

- ・他の製品と混用しないこと。
- ・開封後は出来るだけ速やかに使用すること。
- ・ベースとキャタリストが混入しないように注意すること。
- ・ラテックスのグローブを使用すると固まらなくなるので使用しないこと。
- ・本材が衣服に付いた場合除去が困難なため、必ずエプロン等で衣服をおおったうえで使用すること。（＊）
- ・ミキシングチップ装着前にカートリッジ側のベース、キャタリスト出口のすり切りを行うこと。（ベース、キャタリストが均等に練和されず硬化不良につながる恐れ。）（＊）
- ・使用後、ミキシングチップ SS を装着したまま保管すること。（ミキシングチップ SS の付け替えを行うと、左右のペーストが接触して硬化するおそれ。）（＊）
- ・セット内容のミキシングチップ SS のサイズを使用すること。（サイズ違いのミキシングチップを使用すると、印象材のモレや不十分な練和の原因の恐れ。）（＊）

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

製造日より 2 年（外装箱及び容器に記載）
（記載の有効期間は自己認証（当社データ）による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 （株）ピーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電話番号 052-805-1181
外国製造業者 デンキスト インク
DENTKIST, Inc
国名 韓国