

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー JMDN : 16670000

エクスカット プラス

【禁忌・禁止】

- ・ 破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。
- ・ 歯科従事者以外は使用しないこと。
- ・ 本来の目的以外には使用しないこと。
- ・ 注意事項を厳守の上、使用のこと。
- ・ 器具の改造は行わないこと。

【使用方法等】（＊）

- ① 歯科用ハンドピースに装着する。
- ② 使用前に回転させ、異常がないことを確認する。
- ③ 回転する事によって、歯牙、骨等の硬組織を研削する。
又は、金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いる。

【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕

レギュラー		ショートシャンク	
TF タイプ	10 種	TF タイプ	3 種
TR タイプ	11 種	TC タイプ	1 種
EX タイプ	8 種	FO タイプ	1 種
WR タイプ	1 種	SO タイプ	1 種
FO タイプ	5 種	BR タイプ	2 種
TC タイプ	4 種	TR タイプ	2 種
SF タイプ	1 種	DI タイプ	1 種
SR タイプ	1 種	ファイン	
SO タイプ	2 種	CD タイプ	1 種
BC タイプ	1 種	TC タイプ	2 種
DI タイプ	1 種	TR タイプ	2 種
BR タイプ	6 種	EX タイプ	1 種
コース		エクストラファイン	
BR タイプ	2 種	TR タイプ	5 種
SF タイプ	1 種	TC タイプ	2 種
EX タイプ	1 種	TF タイプ	2 種
SI タイプ	1 種	FO タイプ	5 種
WR タイプ	1 種	EX タイプ	1 種
SR タイプ	1 種	CR タイプ	1 種

全 91 形態 次ページに図あり

〔原理〕

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具をいう。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。

【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、回転することによって、歯牙、骨等の硬組織を研削する。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。

【使用上の注意】

- ・ シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 使用の際は、必ず保護メガネをご使用すること。
- ・ 本来の目的以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
 - ・ 保管中、損傷しないように注意すること。
 - ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- 〔有効期間〕
- ・ 特に定めはないが、異常が見られる場合は使用を避けること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用前にヒビ、割れ、欠け、腐食などの器具の異常がないか目視で確認すること。
- ・ 異常をみとめた場合又は使用中に異常を感じた場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー・リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
国 名 中国

レギュラー
粒子：106～125 μ m
型番

テーパーフラットエンド

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
TF-11	ISO 173/014	24.0	10.0
TF-12	ISO 173/016	22.0	10.0
TF-13	ISO 173/018	22.0	10.5
TF-14	ISO 172/023	22.0	10.0
TF-20	ISO 171/014	21.0	7.0
TF-21	ISO 171/016	21.0	7.0
TF-22	ISO 170/021	18.0	5.5
TF-23	ISO 170/018	20.0	5.0

テーパーフラットエンド

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
TF-31	ISO 170/016	19.0	4.5
TF-42	ISO 170/012	19.0	4.0

テーパーラウンドエンド

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
TR-11	ISO 199/016	22.0	10.0
TR-12	ISO 199/016	22.0	10.0
TR-13	ISO 198/018	22.0	9.5
TR-14	ISO 198/022	22.0	9.5
TR-15	ISO 200/022	24.0	11.5
TR-19	ISO 200/023	23.5	11.5

テーパーラウンドエンド

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
TR-20	ISO 197/013	21.0	7.0
TR-21	ISO 197/016	21.0	7.0
TR-24	ISO 197/018	21.0	7.0
TR-25	ISO 199/016	21.5	10.0
TR-26	ISO 199/018	21.5	8.5

ホイールラウンドエッジ

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
WR-13	ISO 068/042	19.0	2.0

ストレートシリンダー

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
SO-20	ISO 288/012	21.0	6.0
SO-21	ISO 289/014	21.5	6.0

エクストラシェイプ

型番	ISO	長さ (mm)	直径 (mm)
EX-11	ISO 039/032	19.0	5.0
EX-12	ISO 039/034	20.0	7.0
EX-20	ISO 237/018	19.0	5.0
EX-21	ISO 237/021	19.0	5.0
EX-26	ISO 237/032	19.0	5.0
EX-28	ISO 005/018	21.5	8.0
EX-31	ISO 234/014	19.0	4.5
EX-41	ISO 237/010	19.0	3.0

