

添付文書  
歯科材料6 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN: 70891000

## ラボパテ

### 【禁忌・禁止】

- ・本材はシリコンゴム製なので、発疹、皮膚炎などの過敏症がある場合は使用しないこと。
- ・本材は他の材料との混合使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

ベースとキャタリストと2本の計量スプーンから構成される。

構成成分	形状
ベース	青色の粘土状
キャタリスト	白色の粘土状

付属品: スプーン ×2本

#### 【原理】

ベースとキャタリストを練和することにより成分が反応して硬化する。

#### 【性能】(\*\*)

操作時間	45秒~1分
硬化時間	5分
ショアA硬度	86

(室内温度23℃)

#### 【包装】

1箱: ベース(560ml) ×1、キャタリスト(560ml) ×1、スプーン ×2

### 【使用目的又は効果】

シリコン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

### 【使用方法等】

- ① 付属のスプーンでベース材とキャタリストを手のひらに取る。(混合比1:1)
- ② 均一な色になるまで練和する。

### 【使用上の注意】

- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。
- ・口腔内で使用しないこと。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・開封後は出来るだけ速やかに使用すること。
- ・ベースとキャタリストが混入しないように注意すること。

- ・ラテックスのグローブを使用すると固まらなくなるので使用しないこと。
- ・使用後はすぐにふたをすること。
- ・容器内で硬化しますので、ベースとキャタリストは接触しないようスプーンをそれぞれに分けて使用すること。
- ・ポットの中に入っているフィルムを、印象材が空気に触れないようにするために上から押し付けるように貼り付け、ポットのキャップをしっかり閉めて密封した状態で冷蔵所に保管すること。
- ・表面にオイルが出てきた場合は、ガーゼなどで取り除くこと。(オイルがでてくるのを防ぐには、酸素の流入が原因のため、上記のように密閉した状態で保管をすること。)
- ・本材が衣服に付いた場合除去が困難なため、必ずエプロン等で衣服をおおったうえで使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・蛍光灯や紫外線をさけて保管すること。
- ・直射日光や高温、多湿な場所をさけて保管すること。
- ・歯科従事者以外が触れないように、適切な場所に保管すること。

#### 【有効期間】

- ・製造日より2年間
- ・外装箱及び容器に記載

[記載の有効期間は自己認証(当社データ)による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*\*)

販売元	(株)ピーディーアール
住所	愛知県名古屋市中天白区原4-106
TEL	052-846-2718
製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	デンキスト、インク
	DENTKIST, INC
国名	韓国