

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

BS フォトミラー


【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕(*)

本品は、片面が鏡面の厚さ 1.5mm のミラーである。種類は 14 種あり、その中の N-5A、N-5B、N-5C、N-5D、N-5E は、中央が屈曲している。

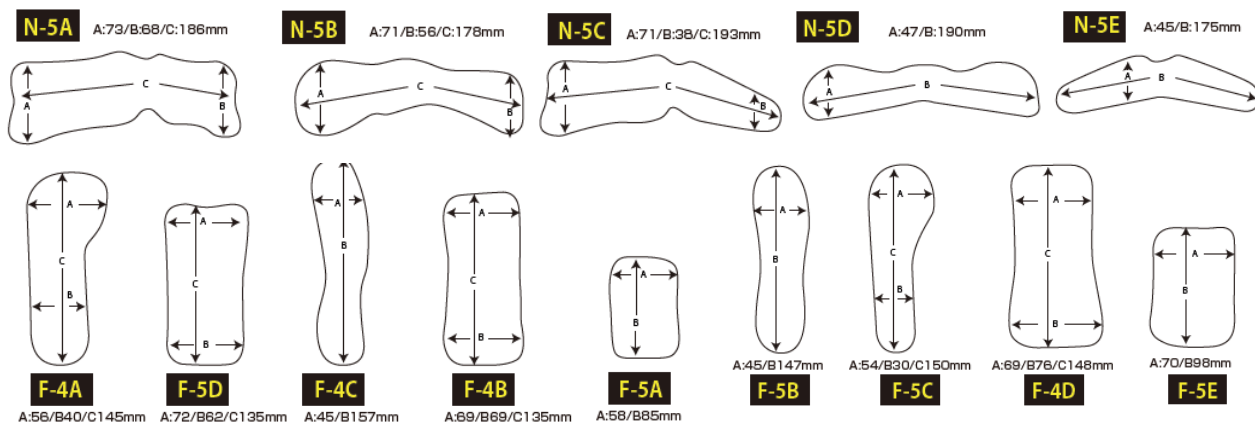

〔原理〕

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

〔原材料〕

ステンレス

〔包装〕

1袋(1入)

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法等】

- ①使用前に、オートクレーブ滅菌を行う。(133℃以下)
滅菌の方法はそれぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②手持ち部を手に持ち、ミラー部を口腔内に入れて口腔内の診察及び撮影が容易にできるように使用する。
- ③使用后、オートクレーブ滅菌を行う。(133℃以下)

【使用上の注意】

- ・破損、変形、劣化、汚染がみられるものは使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
 - ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
 - ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- #### 〔有効期間〕
- ・有効期間等の定めはないが、破損や劣化が見られる場合は使用をさけること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 タンシャン ツェントン エキジビション カンパニー リミテッド
Tangshang Zhengtong Exhibition Co., Ltd.

国 名 中国