

添付文書  
歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN: 35768000

## クリンクリンプロフィーブラシ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】(\*)

[形状・構造](\*\*)

ナイロン製のブラシ部分と銅製の軸部から構成される。先端部と接続部及びブラシの硬さ(ブルー:レギュラー、グリーン:ソフト)により12種類がある。(使用回転数は800~1200rpm)



[原理](\*\*)

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

[包装]

1ケース(100入)

### 【使用目的又は効果】

ブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨のために用いる。

### 【使用方法等】(\*\*)

- ①研磨部位によって本品のレギュラータイプかソフトタイプかを選択する。
- ②使用するコントラハンドピースによって、CAタイプかスクリュータイプかを選択する。
- ③本品をコントラハンドピースに装着する。
- ④本品に研磨用ペーストをつける。
- ⑤本品を歯に軽く押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】

- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・再使用禁止。
- ・シャクを確実に置くまで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
- ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・破損等の恐れがあるため、使用回転数を超えて使用しないこと。

- ・ハンドピースに装着してブレが無いかを確認すること。
- ・使用時に無理な力を加えないこと。(破損や怪我につながる恐れがある。)
- ・スクリュータイプはモーターを逆回転(左回転)にすると外れてしまうため、逆回転で使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期限等】

[保管方法]

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

[有効期間]

- ・特に定めはないが、異常が見られる場合は使用を避けること。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に破損等の異常がないか目視で確認すること。
- ・異常をみとめた場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ  
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1  
TEL 052-805-1181  
外国製造業者 シャンハイ ホアエン インダストリアル カンパニー  
リミテッド  
SHANGHAI HUA EN INDUSTRIAL  
CO Ltd.  
国名 中国