

添付文書
歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN : 16189000

グリーンCAM

【禁忌・禁止】

本品又は本品に含まれる成分に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴ある人は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、直径 98mm の円盤状で、高さは 14mm・16mm・18mm・20mm の 4 種類ある。硬さはソフトタイプ。



【原理】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスとして使用する。

【原材料】

パラフィンワックス・着色剤

【包装】(*)

各サイズ 1 箱 (1 入)

【使用目的又は効果】

CAD/CAM 加工機にて切削加工を行い、歯科鑄造用のワックスパターンを作製する。

【使用方法等】

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じてマージンの調節を行い、通法に従って鑄造を行う。(加工条件: 3000rpm)

※速度が速すぎる場合、切削中にワックスが溶ける場合がある。

【使用上の注意】

- ・再溶解して使用しないこと。
- ・本品は可燃性のため、使用の際はやけどをしないように注意すること。
- ・過度の加熱や、過熱したままでの放置はしないこと。
- ・本品は常温(15℃～25℃)で使用する。
- ・切削加工を行っている際に、過度なワックスの溶解が見られたらすぐに使用を中止すること。

- ・本品は、歯科の従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- ・常温で保管すること。
- ・本品の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

3 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	インターデンタル アルファントデー センター カンパニー リミテッド INTER-Dental R&D CENTER CO., Ltd
国名	韓国