

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN : 70907000

ジルコン フラッシュ

【禁忌・禁止】

本品の成分に対して、既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

容器に入った灰色がかった白色のペーストで研磨材を含有し、補綴物等の研磨に用いる。



〔原理〕

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

〔原材料〕

アルミナ、ダイヤモンド、油脂、その他

〔包装〕

1 ケース（5 g）

【使用目的又は効果】

ジルコニア、e-max、ポーセレン、ハイブリットレジン、コンポジットレジンなどの補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

ディスク等の歯科用研磨器材と併用し、補綴物等の研磨を行う。（推奨回転数 15000rpm）

【使用上の注意】

- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。

【使用方法等】

ディスク等の歯科用研磨器材と併用し、補綴物等の研磨を行う。（推奨回転数 15000rpm）

【使用上の注意】

- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・残った研磨剤は湿気や汚染を防ぐ為に必ず蓋を閉めて密閉すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL	052-805-1181
製造業者	（株）ビーエスエーサクライ
国名	日本