

添付文書
歯06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

JMDN: 70891000

テクニコーン

【禁忌・禁止】

- 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症がある場合は使用しないこと。
- 本品は、他の材料と混合して使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

	性状	成分
ベース	青色 ペースト状	ポリオルガノシロキサン混合物、シリコンオイル等
キャタリスト	白色 ペースト状	白金触媒、シリコンオイル等

付属品: 計量カップ×1



【原理】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いるものをいう。

**【性能】

操作余裕時間	約4分30秒
練和時間	約30秒
硬化時間	約20分~25分
ショアA硬度	20
寸法変化	0.01%
混和比	1:1

【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

- ①ベースとキャタリストを等量カップなどに採取する。
- *②ヘラなどを使用して、色ムラがなくなるまで、約30秒均一に練和する。

【使用上の注意】

- ベースとキャタリストの容器のキャップを入れ間違えないように注意すること。
- ラテックス製の手袋と接触しないようにすること。(硬化を妨げるため成分を含むため)
- 気温が高くなると、操作余裕時間が短くなるため、注意すること。
- 本品の使用により発疹・皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- **よく振ってから使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ベースとキャタリストが混入しないように注意すること。
- 本品は、歯科医療有資格者のみが使用すること。
- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載以外の使用はしないこと。
- 本品の硬化を妨げるもの(硫黄、リン、窒素、アンモニア、亜鉛)を含むものに接触、混入を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- **25度以下で保管すること。(冷蔵庫で保管することを推奨。)
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

製造日より3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1
電話番号 052-805-1181
外国製造業者 Bilkim Tibbi Urunler San.
Ve Tic.
国名 トルコ