

添付文書
医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN : 70975000

再使用禁止

ステラガーゼ

【禁忌・禁止】
・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

本品は、綿100%の8枚重ねの脱脂綿で、4×4cmと4×5cmの2つのサイズがある。

[原理]

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

[原材料]

綿

[包装]

1パック 200枚

1箱 25パック

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的により適宜滅菌（オートクレーブ滅菌、E.Oガス滅菌）をして使用する。

【使用上の注意】

- ・本品を再使用しないこと。
- ・本品は滅菌されていないため、必要に応じて、適切な滅菌を行ってから使用すること。
- ・使用後は、感染防止に留意し、安全な処理を行うこと。
- ・体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 愛知県名古屋市中区高島1-117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー
リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD..
国名 中国