

添付文書
機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成へら JMDN：38530000

石こうスパチュラ（金属）

【禁忌・禁止】


〔使用方法〕

- ・洗浄・滅菌せずに使用しないこと。
- ・変形、劣化、破損がみられる製品は使用しないこと。（ケガの恐れ）

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品はハンドル部と作業部で構成される。

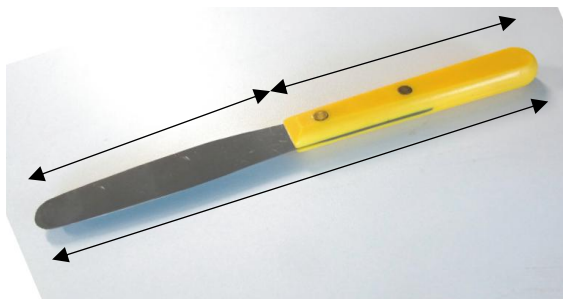

全長 197mm、ハンドル部 100mm、作業部 97mm

〔原材料〕 ハンドル部：PC、作業部：SUS201

〔原理〕

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するへら状の器具をいう。

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するへら状の器具をいう。

【使用方法等】

〔使用前準備〕

- ① 変形、劣化、破損が見られないことを確認する。
- ② 本品がオートクレーブ滅菌されていることを確認する。（オートクレーブ滅菌：134℃ 20 分推奨 乾燥工程不可）

〔使用〕

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する。

〔使用后〕

- ① 作業部に付いた歯科用印象材料を、クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ワールなどで取り除く。

- ② 歯科用アルコールに浸けて十分な洗浄を行った後、流水で洗い流す。

- ③ 清潔な毛羽立ちのない柔らかな布等で、水分を拭きとる。

- ④ 洗浄後、オートクレーブ滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌：134℃ 20 分推奨 乾燥工程不可）

【使用上の注意】

- ・洗浄・滅菌せずに使用しないこと。
- ・変形、劣化、破損がみられる製品は使用しないこと。（ケガの恐れ）
- ・過度の衝撃を与えないこと。
- ・破損や事故の原因となるので、切削、打刻、曲げなどの改造は絶対に行わないこと。
- ・歯科医療従事者以外は、使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】に記載以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科材料（印象材料、セメントなど）が付着したまま保管しないこと。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。

〔有効期間〕

- ・本品は、有効期間等を特別に定めていない為、長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することがある。安全管理上、新しい物と適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中白区高島 1-117-1
T E L	052-805-1181
外国製造業者	B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. (ビー イチ メディカル プロダクツ カンパニー リミテッド)
国名	中国