

添付文書

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器

非天然ゴム製検査・検診用手袋

JMDN：70976000

再使用禁止

ニトリス

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ニトリルゴムによるアレルギーの既往歴のある術者及び患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、アクリロニトリスブタジエンゴム（NBR）を主材料とした、未滅菌の左右兼用の単回使用グローブである。（パウダーなし・内部クリーネーション加工・梨地加工あり・袖口巻き化工）サイズは下記の通りである。

〈サイズ〉

サイズ	SS	S	M	L
全長（mm）	230 以上			
手のひらの幅（mm）	75±5	80±5	95±5	110±5
中指の長さ（mm）	76±5	79±5	83±5	84±5
指先厚み（μm）	90±20			
掌厚み（μm）	60±20			

〈物性〉

物性	老化前	老化後
引張強さ（MPa）	14 以上	14 以上
伸び率（%）	500	400

〔原理〕

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋をいう。歯科用手袋を除く。

【使用方法】

箱を開封し、取り出し口よりグローブを取り出し、装着する。

【使用上の注意】

- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状があらわれた場合は、使用を中止すること。
- ・汚損、ピンホール、異物などの異常が、見られた場合は使用しないこと。
- ・感染防止のため、患者ごとに取り換えること。
- ・刃物等の鋭利な器具や熱いものに触れると、破れたり穴が開いたりする可能性があるので注意すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透する場合があるため、確認の上使用すること。
- ・使用後の本品を廃棄する際は、感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、低温、多湿、直射日光、蛍光灯、紫外線、水濡れを避けて、清潔な場所に常温で保管すること。

〔有効期間〕

- ・劣化がみられる場合は、使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	Ever Global (vietnam) ENT. CORP.
国名	ベトナム