

添付文書

歯 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯磨カップ JMDN：16184000

再使用禁止

クリアプロフィーカップ（Uタイプ）


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、アングルが 90° タイプと 105° タイプがあり、それぞれにカップの柔らかさで、ソフトタイプとミディアムタイプがある。

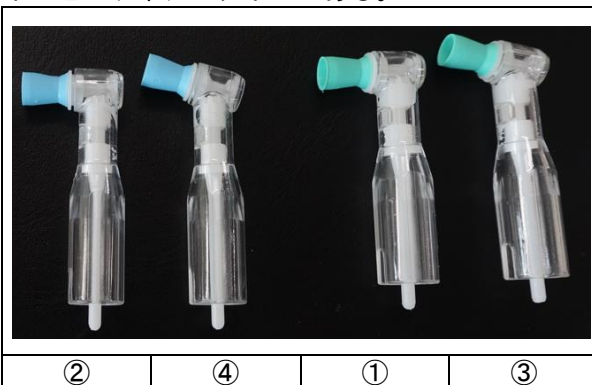

- ①90° ソフト
- ②90° ミディアム
- ③105° ソフト
- ④105° ミディアム

最高回転速度：5000rpm

[原理]

Uタイプノーズ（JIS T5912：2020）を持つプロフィーハンドピースに接続して使用し、回転させることにより歯面の研磨・清掃を行う。

[原材料]

カップ部：TPE
ボディー部：PC

【使用目的又は効果】

歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる、通常、ゴム製の器具をいう。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

- ①研磨部位によって種類を選択する。
- ②Uタイプノーズ（JIS T5912：2020）を持つプロフィーハンドピースに接続する。
- ③カップに研磨用ペーストをつける。
- ④カップを歯に軽く押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- ・作業時には、保護メガネ及びマスク等を装着すること。（目の損傷、飛沫感染を防ぐため。）
- ・使用後は、各自治体の指導に従って、適切に廃棄を行うこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- ・使用前に、試運転を行い、異常が見られないことを確認すること。
- ・無理な角度、加圧での使用をしないこと。
- ・再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて、外圧（物理的負荷）を受けない、通気性がよく、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
T E L	052-805-1181
外国製造業者	B. H MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. ビーエイチ メディカル プロダクツ カンパニー リミテッド
国名	中国