

添付文書
器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 JMDN：70459000

再使用禁止

マルチニードル

【禁忌・禁止】

- ・破損品使用禁止
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本品は、針管及び針基で構成される。針管の外径により 5 種類ある。

25G	
22G	
20G	
19G	
18G	

〔原材料〕

ステンレス、PP

〔原理〕

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具をいう。

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ① 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
- ② 適したサイズを選択し、ルアーロック式のシリンジ等に装着する。
- ③ 口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

【使用上の注意】

- ・針に直接触れないこと。
- ・予め接続部が緩んでいないかを確認すること。
- ・接液部を汚染させないこと。
- ・強圧洗浄は避けること。
- ・針管部に過剰な負荷をかけないこと。
- ・製品に破損等の異常が見られる場合は使用しないこと。
- ・歯科有資格者以外は使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者住所	(株) ビーエスエーサクライ 愛知県名古屋市天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー リミテッド B. H MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. .
国名	中国