

添付文書

歯 07 歯科用ワックス

一般医療機器

歯科用パラフィンワックス

JMDN：70893000

F E E Dパラフィンワックス ベーシック

【禁忌・禁止】

- ・高温の場所で保管しないこと。
- ・火気厳禁。

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

本品は、パラフィンワックスを主成分とした、長方形の板状のワックスである。厚さは約 1.4mm、大きさ 146×73mm

【物理的性質】

融点：58℃

【原理】

熱を加えて軟化させ、義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いる。

【原材料】

パラフィンワックス、その他

【包装】

1 箱：1kg

【使用目的又は効果等】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いるワックスをいう。

【使用方法等】

- ① 板状のワックスを加熱して棒状にし、棒状になったワックスを馬蹄形にして基礎床に圧接する。
- ② 過不足部分は盛ったり、足したり、削ったりし基礎床に圧接する。

【使用上の注意】

- ・【使用目的又は効果】の欄に記載以外に使用しないこと。
- ・本品は可燃性であるため、火災、火傷等に注意すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管及び有効期間等】

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・本品は、日光が当たる場所に保管しないこと。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、保管場所には消火設備を備えること。
- ・高温、多湿な場所を避けて保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の者が触れない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	上海ラビット有限公司
国名	中国