

添付文書
機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN：41876000

BSA クイックコンデンサー

【禁忌・禁止】

【使用方法】

- ・洗浄・滅菌せずに使用しないこと。（交差感染の恐れ）
- ・変形、劣化、破損がみられる製品は使用しないこと。（ケガの恐れ）

【適用患者】

- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。（アレルギー症状の恐れ）

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

本品はハンドル部とチップ部で構成される。（ハンドル部とチップ部の取り外し可能。）

チップの形状により 4 種類ある。

全長はすべて 178mm。



種類	先端径	チップの色
N35/S70	Φ0.35mm/Φ0.70mm	グリーン
N40/S80	Φ0.40mm/Φ0.80mm	グレー
N50/S100	Φ0.50mm/Φ1.00mm	イエロー
N60/S120	Φ0.60mm/Φ1.20mm	ブルー

【原材料】ハンドル部：アルミ合金、
シャंक部：アルミ合金、
チップ部：Ni-Cr-Ni チタニウム合金、SUS304

【原理】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具をいう。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具をいう。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

【使用方法等】

【使用前準備】

- ①チップ及びハンドルが、オートクレーブ滅菌されていることを確認する。（オートクレーブ滅菌：134℃ 4分推奨 乾燥工程不可）
- ②変形、劣化、破損が見られないことを確認する。
- ③チップをハンドルに接続する。（しっかり接続されているかを確認する。）

【使用】

- ①根管に充填物を充填、圧着する。

【使用後】

- ①洗浄後、オートクレーブ滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌：134℃ 4分推奨 乾燥工程不可）

【使用上の注意】

- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。（アレルギー症状の恐れ）
- ・洗浄・滅菌せずに使用しないこと。（交差感染の恐れ）
- ・変形、劣化、破損がみられる製品は使用しないこと。（ケガの恐れ）
- ・歯科医療従事者以外は、使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】に記載以外に使用しないこと。
- ・本品の先端部は、鋭利なので使用に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。

〔有効期間〕

- ・製造日より5年
- ・外装袋に記載。

（記載の有効期間は自己認証（当社データ）による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市天白区高島1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd. (チェンダウ サニ メディカル イクイップメント カンパニー リミテッド)
国名	中国