

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN：70907000

ブレイジングスター


【禁忌・禁止】

・破損、変形、劣化が見られる場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

本品は、軸部と先端研磨部から構成される。毛の硬さにより 2 種類ある。最高回転速度 20000rpm（推奨回転速度 10000～15000rpm）

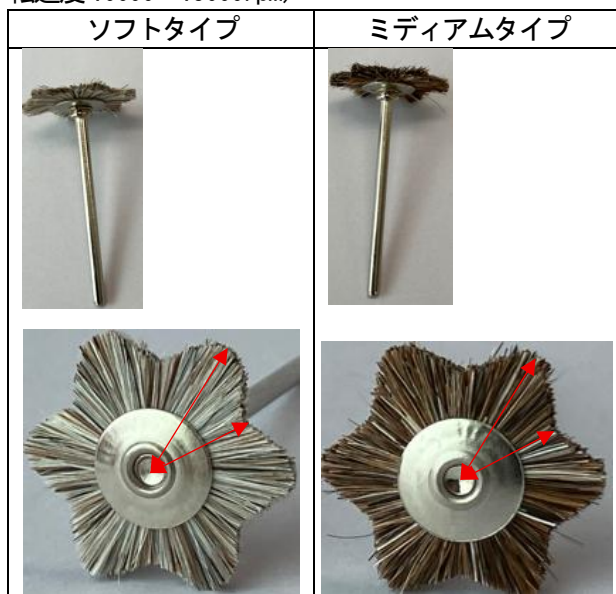

軸径：Φ2.35mm 全長：43mm

直径（長：Φ22mm、短：Φ16.75mm）

【原材料】

軸部：鉄（亜鉛メッキ）

先端部：羊・馬毛（ソフト）、馬毛（ミディアム）

【原理】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法】

- ① 本品の適した種類を選択する。
- ② 本品を歯科技工用ハンドピース等に装着する。

③ 装着が確実にされていることを確認後、本品を使用前に回転させ、正常に動作することを確認する。

④ 回転させた本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ・本品の軸部サイズに適したハンドピース等に装着すること。
- ・使用前に装着が確実にされているか、正常に回転するかを確認すること。
- ・無理な角度、過度の圧力での使用はしないこと。
- ・最高回転速度を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・破損、変形、劣化が見られる場合は、使用しないこと。
- ・使用する際は、保護眼鏡、防塵マスク等を装着すること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。
- ・水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気の多い場所は避けること。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

- ・有効期間等の定めはないが、破損や劣化が見られる場合は使用をさけること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	上海ラビット有限公司
国名	中国