

歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用アルギン酸塩印象材 35863000

F E E Dアルジネート印象材

【形状・構造及び原理等】

- 性状 粉末
- 成分
アルギン酸塩、硫酸カルシウム、酸化マグネシウム、珪藻土
リン酸ナトリウム、フッ化チタン酸カリウム
- 原理
アルギン酸の可溶性塩を主成分とする歯科用の印象材で、水と練和することによりゲル化し、口腔内の印象採得に用いる。

4. 物理的性質

操作時間	3分40秒以内
初期硬化時間	2分30秒
弾性回復	95.0%以上
弾性ひずみ	5.0~20.0%

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ビーエスエーサクライ
住 所 愛知県名古屋市天白区高島一丁目117番地1
電 話 052-805-1181
外国製造業者 PRIME DENTAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
国 名 インド

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】

- 本品大きじ2杯（18g相当）と水1カップ（36ml相当）を混合し滑らかなペーストが形成されるまで練和する。
練和時間：40~60秒
- 練和後印象トレーに盛り、口腔内で圧接、保持する。
口腔内保持時間：1分~3分
- 口腔内から撤去し流水で洗浄後、余剰水分を除く。
- 水分を除いた後、速やかに歯科用硬質石こうを注入する。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- 粉末は、計量前によくほぐしてから採取すること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品を使用する際はマスク等を使用し、粉じん等の吸入を防止すること。
- 本品を誤飲させないように注意すること。万一誤飲した場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

「有効期間」

包装の使用期限欄を参照のこと。
使用期限を超えた製品は使用しないこと。