

ハクゾウラパロガーゼNEO

再使用禁止

【禁忌・禁止】
 1. 再使用禁止
 **2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
 [切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
 **3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】
 *綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X 線で検知できる糸を織り込んだものである。

[X 線造影材]

名 称	成 分
X 線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・ポリプロピレン（固定材） ・ウルトラマリン（着色剤）

【使用目的又は効果】
 出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X 線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】
 *使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。
 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】
 ・重要な基本的注意
 **1. 体内に留置しないこと。
 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
 1. 保管方法
 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

 **2. 有効期間
 本品の容器若しくは被包に記載
 [自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
 ・製造販売業者
 ハクゾウメディカル株式会社
 *大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
 **<http://www.hakuzo.co.jp/>
 TEL 06-6942-0451(代)