

医 04 整形用品
 一般医療機器 X 線造影材入りガーゼ JMDN コード 32374000

ハクゾウ滅菌オペガーゼ NEO（ヒモ付）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- X 線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
 [切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]
- 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

*綿 100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品に、X 線で検知できる糸を織り込み、柄を取り付けている。
 本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

[X 線造影材]

名 称	成 分
X 線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・ポリプロピレン（固定材） ・ウルトラマリン（着色剤）

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X 線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

*使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- **1. 体内に留置しないこと。
 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 3. 包装開封後、速やかに使用すること。
 * 4. 取り付けている柄は、身体内部から出して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間
 本品の容器若しくは被包に記載
 [自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者
 ハクゾウメディカル株式会社
 *大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
 *<http://www.hakuzo.co.jp/>
 TEL 06-6942-0451(代)