

医 04 整形用品  
 一般医療機器 X 線造影材入り スポンジ JMDN コード 13705000

# ガーゼ巻きコットンG

## 再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]

3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

\*\*脱脂綿やガーゼとX線造影材の組み合わせからなり、成形や縫製や表面加工によって一体化したものである。

[X 線造影材]

| 名 称    | 成 分                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| X 線造影糸 | ・硫酸バリウム（造影剤）<br>・スチレン系エラストマー（固定材）<br>・TET 5MA636 GRN（着色剤） |

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載  
[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

\*\*<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

\*\*使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

\*1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

4. 糸を強く引っ張らないこと。

5. 製品を分解して使用しないこと。