

エレバンプレスタット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- パッド : 脱脂綿
粘着テープ : ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

- * 身体の部位に用いる、接着剤を付した布製又はプラスチック製の各種形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- * 1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- * 2. 包装開封後、速やかに使用すること。
- 3. 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用すること。
- 4. 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1~2回粘着面の位置を変えること。
- * 5. パッド部分の濡れ、汚れは傷の治りが悪くなる場合があるので貼りかえること。
- 6. 粘着面を患部に貼らないこと。
- 7. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
- 8. テープを過度に伸ばした状態で皮膚に貼付すると皮膚への刺激が高まる恐れがあるため注意すること。
- 9. 本品は貼付してから2時間を目安に剥がすこと。また、剥がす際は止血が完了していることを確認すること。
- 10. 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)