

滅菌円柱状ガーゼ G（ヒモ付）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止  
 \*\*2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]  
 \*\*3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

綿 100%の綿糸により構成されたガーゼを円柱状として縫製し、X 線で検知できる糸及び柄を取り付けている。

本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

[X 線造影材]

| 名 称    | 成 分                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| X 線造影糸 | ・硫酸バリウム（造影剤）<br>・スチレン系エラストマー（固定材）<br>・TET 5MA636 GRN（着色剤） |

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*\*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\*大阪府中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

\*\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

\*使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

\*\*1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 包装開封後、速やかに使用すること。