

医 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

滅菌円柱スポンジ G（ドライ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

※2. X 線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。

〔切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある〕

※3. 電気メス等を近付けないこと。〔火する恐れがある〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

※2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

〔自己認証（自社データ）による（使用期限参照）〕

【形状・構造及び原理等】

綿 100% の発泡体を円柱状に加工し、X 線で検知できる糸及び柄を取り付けたものである。

本品は酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行っている。

〔X 線造影材〕

名 称	成 分
X 線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

※大阪府中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

※<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

※ 袋から取り出し、不潔にならないように注意して取り出し、生理食塩水等で柔らかくした後、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官保護のため用いる。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

※1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 包装開封後、速やかに使用すること。