

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ JMDN コード 13705000

プレットG

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

**2. X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。

[切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがある]

**3. 電気メス等を近付けないこと。[引火する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したもので、X線検出可能な成分を含む糸を取り付けている。微小繊維状セルロースで表面加工を施している。

[X線造影材]

名称	成分
X線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

**使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

**1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。

3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証（自社データ）による（使用期限参照）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

**<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)