

ハクゾウキュアドレS

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

表面材：コットン不織布

吸収材：レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの複合不
織布・アクリル酸系高吸水性ポリマーシート

防水材：ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤（ホットメルト）でシート状に一体化したものの。

*【使用目的又は効果】

術後創傷の被覆・保護。

【使用方法等】

1. 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、無菌的に滅菌袋より取り出し、本品の吸収面（白色面）を創部に当てること。
2. 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 裁断加工禁止
 - (2) 体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。
 - (3) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (4) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
 - (5) 創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行うこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じるおそれがある。

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

防水材側を創部側に使用しないこと。（吸収しないため）

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載 [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

* <https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)