

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000

## エレファクロス ラグゼ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

布状製品である。材料の繊維が不織布の吸収体となる。

#### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
  1. 体内に留置しないこと。
  2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

[自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
\*<https://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)