

機械器具(01)手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000  
**サージテーブルアクセサリ(手用手術台)**

**【警告】**

＜使用方法＞

- 正しいポジショニングを行い、患者さんの状態を継続的に観察してください。患者さんの上肢を固定する際は、締め付け過ぎないように十分注意してください。[誤ったポジショニングにより患者さんの身体機能が害される可能性があります。]

**【禁忌・禁止】**

＜併用医療機器＞(＜相互作用＞の項参照)

- 本品はMR Unsafeであり、MR検査は禁忌です。MR検査を行う際は検査室に持ち込まないでください。[MR装置への吸着や、誘導電流による火傷等の可能性があります。][自己認証による] \* \*


＜使用方法＞

- 本装置にもたれかかる、座る等、術者の体重をかけたり押ししたりしないでください。[本装置が手術台から落下する可能性があります。]\*
- スタンド付手用手術台取り付け後は、手術台の高さを変更しないでください。[本装置が破損する可能性があります。]\*


**【形状・構造及び原理等】**

＜形状＞


- 手用手術台(長方形型)

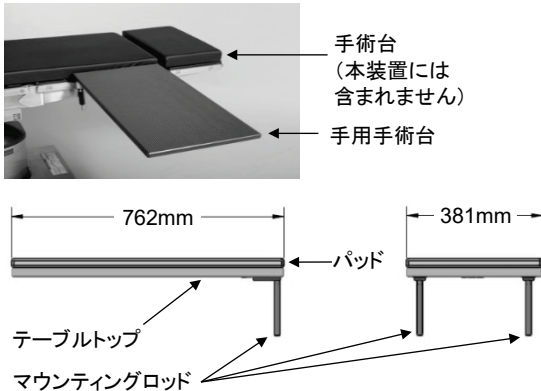


- 手用手術台(長方形型スタンド付き)\*

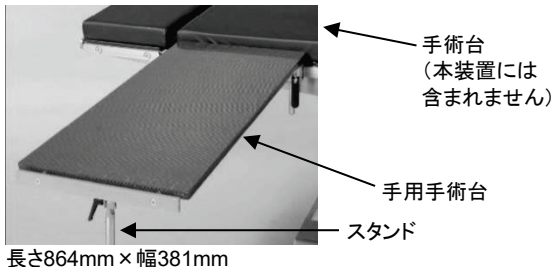

- 手用手術台(砂時計型)

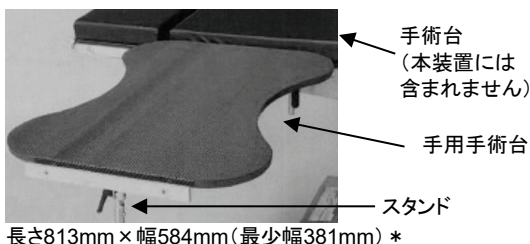

4. クランプ

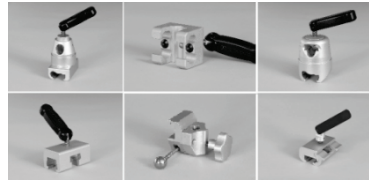

＜機能＞

- 適用患者体重: 227kg以下

＜作動・動作原理＞

手術台に取り付けた本装置により、手術台に載せた患者さんの身体の位置を調節し、固定します。

**【使用目的又は効果】**

本品は、手術台に載せた患者の任意の部位を調節・固定し、手術の最適なポジショニングを確保するためのアクセサリである。

**【使用方法等】**

＜使用方法＞

- クランプを2個、サイドレールに取り付けます。
- 本装置のマウンティングロッドをクランプに差し込みます。
- 本装置が、手術台のテーブルトップと同じ高さになる位置に調節し固定します。
- スタンド付手術台の場合は、スタンドを立てて固定してください。\*

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞\*

- 適用患者体重を遵守してください。[機器の破損や患者さんの脱落を予防します。]
- 本装置を取り付ける手術台の適用患者体重が、本装置の適用患者体重より小さい場合には、手術台の適用患者体重を遵守してください。

**【使用上の注意】**

＜重要な基本的注意＞

- 本装置を取り付ける手術台の使用方法を遵守してください。
- 手術台を調節するときや搬送する際に、アクセサリ、手術台と患者さんが衝突する可能性があります。調整手順を観察して、衝突を避けてください。
- 本装置を手術台に取り付けることによって、手術台の重心に影響が及びます。移動型の手術台の場合は特に、手術台の使用方に注意してください。
- 本装置を固定する手術台のサイドレールに適応するクランプを選択してください。
- 必ず手術台にクランプをつけてから、本装置を取り付けてください。
- クランプの手術台サイドレールへの固定と、本装置のクランプへの固定は確実にを行い、使用前に緩みがないか確認してください。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

- 併用禁忌(併用しないこと)\* \*

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	検査室に持ち込まないこと。MR検査を行う際は、本品と併用しないこと。	MR装置への吸着や、誘導電流による火傷等の可能性がある。

**【保管方法及び有効期間等】**

＜保管の条件＞

- 保管温度: -19℃~+30℃
- 高温多湿を避けて保管してください。

**【保守・点検に係る事項】**

＜使用者による保守点検事項＞

- 使用前に汚れ、破損、可動部の動き等を点検してください。
- 不適切な薬剤の使用及びクリーニング及び消毒、又は薬剤の過剰使用は、製品に損傷を与えるため、使用する薬剤の取扱説明書及び、院内プロトコルに従って行ってください。

3. 洗浄・消毒には、以下の製品を使用しないでください。

- ・ アルコールを含む薬剤(手指消毒液等)
- ・ ハロゲン系の薬剤(フッ素系、塩素系、臭素系、ヨウ素系等)
- ・ 表面が傷つくおそれのあるもの(研磨材、ワイヤーブラシ等)
- ・ 塩素を含む製品

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売業者〕

株式会社TKB

電話番号:03-5762-3077

〔外国製造業者〕

シャーチ社

(Schuerch Corporation)

アメリカ合衆国

2407-5

販売元



2407-1-0-MKT