

機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000
tkbエクステンションチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜組成＞

チューブ: ポリ塩化ビニル(可塑剤: DEHP不使用)

＜形状＞

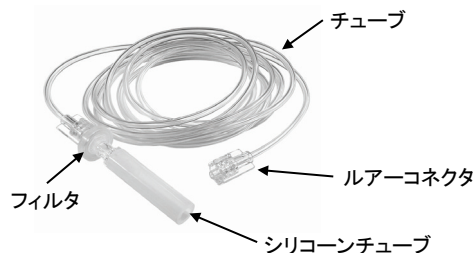

＜作動・動作原理＞

吸引用器具と回収容器とを接続し、手技中の体液等の吸引を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、吸引用器具と回収容器の接続に用いる吸引用のチューブである。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. シリコンチューブを吸引用器具に接続し、ルアーコネクタを回収容器に接続してください。
2. 接続した吸引用具及び回収容器の使い方に従って、吸引を行ってください。
3. 使用後は感染防止に留意し、規定に従い廃棄してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に、滅菌包装及び外観、機能に異常がないかを確認してください。
2. 併用する他の医療機器との適合性を予め確認してください。
3. 使用中はチューブの折れ曲がりや閉塞、コネクタの抜けがないことを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用中にチューブ内に詰まりが認められた場合には、直ちに吸引操作を中止し、速やかに本品を交換してください。
2. 本品はMR Safeであり、一般的なMRI検査による影響はありません。
[自己認証による]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 湿度 : <80%RH(非結露状態)
2. 腐食性ガスがなく風通しのよい場所で保管してください。
3. 水濡れ、高温、多湿、直射日光を避けて室温で保管してください。

＜有効期間＞

1. 滅菌有効期限: 2年間[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社TKB

電話番号: 03-5762-3077

[外国製造業者]

グアンジョウ フェホン バイオテック社

(Guangzhou Hehong Biotech Co Ltd)

中華人民共和国

2503-1

販売元



2503-1-0-MKT