

機械器具(32)医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000 (吸引チューブ 16779000)

tkb Endoscope結石片収集ボトルセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造・構成ユニット>

1. 構成
 - (1) 結石片収集ボトル
 - (2) 吸引チューブ
2. 形状

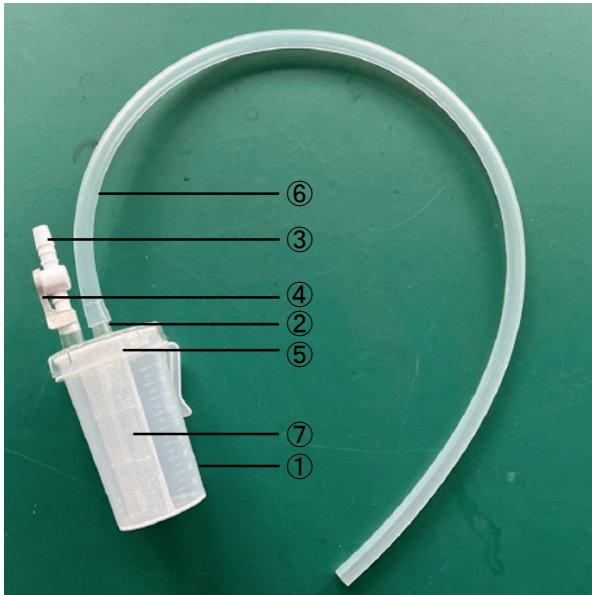

①	ボトル	⑤	ふた
②	注入ポート	⑥	吸引チューブ
③	排出ポート	⑦	フィルタ
④	圧調整レバー		

タイプ	ボトル容量	吸引チューブ 内径	吸引チューブ 長
MD-B-PT100-02	100mL	8mm	750mm
MD-B-PT140-02	140mL		
MD-B-PT180-02	180mL		
MD-B-PT200-02	200mL		
MD-B-PT250-02	250mL		

<原理・機能>

吸引チューブを介して結石片収集ボトルと専用のアクセスシースを接続することによって、術中の吸引及び体液、結石片等の排出等を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、患者等から吸引された、体液、結石片等を回収、貯留、廃棄するために使用する。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 圧調整レバーをひねり、弁閉鎖にする。
2. 吸引チューブを用いて本品の注入ポートと専用のアクセスシース(※)のポートを接続する。
3. 汎用のチューブを用いて本品の排出ポートと吸引装置(本品に含まれない)を接続する。
4. 陰圧調整のため、圧調整レバーをひねり排出ポートを開放する。
5. 術後、結石片収集ボトルを取り外し、結石片等を採取する。
6. 適切な方法で廃棄する。

<組み合わせて使用する医療機器>

1. 販売名: tkb Endoscopeサクシオンシース
認証番号: 307ADBZX00030000(※)

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前に、包装及び外観、機能に異常がないかを確認してください。
2. 使用前にすべての接続部分の接続が確実であることを確認してください。[接続が不十分な場合、漏れや十分な性能が得られない場合があります。]
3. 本品と併用する吸引器の吸引圧は、-20kPaを超えないでください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はありません。

<不具合・有害事象>

- ・ その他の不具合・有害事象

1. その他の不具合

- (1) 破損
- (2) 亀裂
- (3) 変形
- (4) 損傷
- (5) 吸引不良
- (6) 接続不良
- (7) 漏れ
- (8) 詰まり

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 温度: 10~40℃
2. 湿度: 80%RH以下(非結露状態)

<有効期間>

1. 有効期間: 3年間[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社TKB
電話番号: 03-5762-3077

[外国製造業者]

チュウアンシイアン メディカル テクノロジー社
(Zhejiang Chuangxiang Medical Technology)
中華人民共和国
バシン社
(Hunan Vathin Medical Instrument Co Ltd)
中華人民共和国

2507-1

販売元



2507-1-0-MKT