

機械器具(06)呼吸補助器  
管理医療機器 単回使用人工鼻用フィルタ 70572000

ニューモイスト シリーズ (バクテリアフィルタ)

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 水分が貯留したときは、速やかに本品を交換してください。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性があります。また、人工呼吸器との併用においては、呼吸回路に外れが生じた場合、低圧警報が作動しない可能性があります。]
2. 本品の使用前及び使用中に、呼吸回路等が正しく組み立てられ、各接続部が緩みや外れが生じないようにしっかりと接続されていることを常に確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正常な換気を妨げる可能性があります。]
3. 常に患者さんの状態及び本品の観察を行い、流量抵抗を確認してください。

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞


1. 本品はアレバール、超音波ネブライザと同時に使用しないでください。[＜相互作用＞の項参照] \* \*

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 本品を人工鼻の代用として使用しないでください。[人工鼻の機能を備えていません。]
3. 本品は24時間を越えて使用しないでください。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、適切な換気が行えない可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

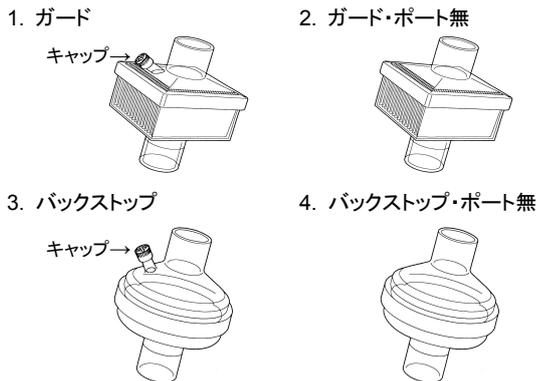

＜機能＞

1. 流量抵抗@60L/min \*
  - (1) ガード、ガード・ポート無 : 0.16kPa \*
  - (2) バックストップ、バックストップ・ポート無 : 0.14kPa \*
2. 細菌・ウイルス除去効率 \*
  - (1) ガード、ガード・ポート無 : 99.9999%以上 \*
  - (2) バックストップ、バックストップ・ポート無 : 99.99%以上 \*

【使用目的又は効果】


＜使用目的＞

本品は、人工呼吸器あるいは麻酔器の使用時に、呼吸回路等に接続し、機器を細菌・ウイルス汚染から保護するためのフィルタである。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 本品を呼吸回路末端と人工呼吸器又は麻酔器の間に接続し、使用します。

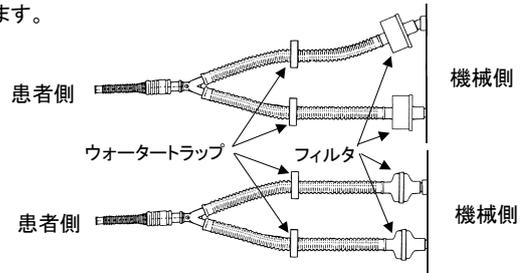

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前にキャップが締まっていることを確認してください。\*
2. 本品を使用することで呼吸回路に死腔が加わるため必要に応じて換気の補正を行ってください。\*

【使用上の注意】\*

＜重要な基本的注意＞ \*

1. 使用中は患者さんを注意深く観察してください。異常が見られる場合には、本品を取り外すか、新しい製品と交換してください。\*
  2. 液体に浸けてすすいだり洗浄したりすることや、滅菌処理又は消毒剤の使用は避けてください。[本品の素材を損なう可能性があります。]\*
- ＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)＞

1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アレバール、超音波ネブライザ	フィルタと併用しないこと。	フィルタが閉塞し、換気が困難となる可能性がある。 * *

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
3. 重ねて保管する場合、重みで本品が破損しないようにしてください。

＜有効期間＞

1. 有効期間: 3年間(製造業者データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社TKB  
電話番号: 03-5762-3077

〔外国製造業者〕

アールストローム ムンクショー ファールン AB社 \* \*  
(Ahlstrom-Munksjo Falun AB) \* \*  
スウェーデン王国

1804-12

お問い合わせ先



電話番号:  
03-5762-7252

1804-10000-4-FU (MKT)