

[MU-02]

* * 2018年 4月改訂(第10版)
* 2016年 7月

認証番号:219AABZX00077000

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 人工鼻 70570000
「ニューモイスト」の付属品
ソフトフレックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<形状>

ソフトフレックス

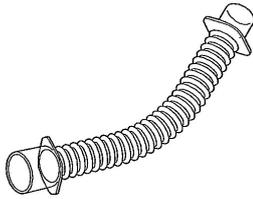

1. 接続部 : 15mmメス/15mmオス
2. 質量 : 9g
3. 長さ : 157mm ± 3mm

【使用目的又は効果】


<使用目的>

本品は、人工呼吸器あるいは麻酔器等からのガスを患者に供給する際に用いる、人工鼻の付属品です。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 本品を下記に示すように接続し、使用します。

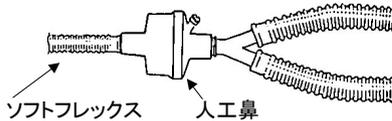

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前、使用中は必ず接続部分や呼吸回路をチェックし、リーク(漏れ)がないことを確認してください。*
2. 着脱時は過度な力をかけたり、捻じったりしないでください。*
3. 呼吸回路からの着脱時は本品の端子コネクタを持ち、着脱してください。[蛇腹部を保持しての着脱は破損、亀裂の原因となります。]*
4. 本品を使用することで呼吸回路に死腔が加わるため必要に応じて換気の補正を行ってください。*

【使用上の注意】*

<重要な基本的注意> *

1. 使用中は患者さんを注意深く観察してください。異常が見られる場合には、本品を取り外すか、新しい製品と交換してください。*
2. 液体に浸けてすすいだり洗浄したりすることや、滅菌処理又は消毒剤の使用は避けてください。[本品の素材を損なう可能性があります。]*

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

<有効期間>

1. 有効期間:5年間(製造業者データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社 TKB
電話番号:03-5762-3077

[外国製造業者]

アールストローム ムンクショー ファールン AB社 **
(Ahlstrom-Munksjo Falun AB) **
スウェーデン王国

1804-12

お問い合わせ先



電話番号:
03-5762-7252

1804-10000-4-FU (MKT)