

機械器具(06)呼吸補助器  
管理医療機器 人工鼻 70570000

## ニューモイスト (気管切開患者用人工鼻)

再使用禁止

### 【警告】

#### ＜使用方法＞

1. 分泌物が溜まったときは、本品を交換してください。[分泌物過多の患者さんでない場合も本品に患者さんの分泌物が付着することにより、流量抵抗の上昇あるいは閉塞の可能性があります。]
2. 常に患者さんの状態及び本品の観察を行い、流量抵抗を確認してください。

### 【禁忌・禁止】

#### ＜適用対象(患者)＞

1. 分泌物過多の患者さんには使用しないでください。[流量抵抗が上昇あるいは閉塞の可能性があります。]
2. 一回換気量が1,000mLを超える患者さんには使用しないでください。[流量抵抗の上昇により、換気が困難となる可能性があります。]
3. 一回換気量が75mLを下回る患者さんには使用しないでください。

#### ＜併用医療機器＞

1. 本品はネブライザと併用しないでください。[＜相互作用＞の項参照] \* \*
2. 本品は加温加湿器と併用しないでください。[＜相互作用＞の項参照] \* \*

#### ＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 本品は24時間を越えて使用しないでください。[流量抵抗の上昇あるいは閉塞により、適正な換気が行えない可能性があります。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### ＜形状＞

トラックガードHC

酸素吸入口→



#### ＜機能＞

1. 死腔量 : 15mL \*
2. 質量 : 5g \*
3. 一回換気量 : 75~1,000mL \*
4. 流量抵抗@30L/min : 0.013kPa \*
5. 加湿性能 : 20mgH<sub>2</sub>O/L \*

### 【使用目的又は効果】

#### ＜使用目的＞

患者の人工気道に沿って接続した場合等に、患者の呼気の熱と水分を捕捉し、これらを利用して吸気ガスを加温及び加湿すること。

### 【使用方法等】

#### ＜使用方法＞

1. 本品を気管切開チューブに対し真っ直ぐに緩みや外れが生じないようにしっかりと接続し、使用します。



#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 他の製品と接続する場合には、その互換性や安全性を十分確認して使用してください。\*
2. 他の製品と接続する場合は、閉塞が起こらないよう十分に吸気・呼気回路が確保されることを確認して使用してください。\*
3. 着脱時は過度な力をかけたり、捻じったりしないでください。\*
4. 使用前に水や薬液等の湿気を加えないでください。\*
5. 呼気量が吸気量より少ないと、効果的に加湿されない場合があります。\*
6. 過換気傾向の患者には、適切に加湿されない場合があります。\*
7. 特に寒冷環境下では、本品が凍り換気を妨げる可能性がありますので、注意してください。\*

### 【使用上の注意】\*

#### ＜重要な基本的注意＞\*

1. 使用中は患者さんを注意深く観察してください。異常が見られる場合には、本品を取り外すか、新しい製品と交換してください。\*
2. 液体に浸けてすすいだり洗浄したりすることや、滅菌処理又は消毒剤の使用は避けてください。[本品の素材を損なう可能性があります。]\*

#### ＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

##### 1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ネブライザ	人工鼻と併用しないこと。	本品が目詰まりを起こし、患者さんが呼吸困難を起こす可能性がある。* *
加温加湿器	人工鼻と併用しないこと。	本品が閉塞し、換気が困難となる可能性がある。* *

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管の条件＞

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
3. 重ねて保管する場合、重みで本品が破損しないようにしてください。

#### ＜有効期間＞

1. 有効期間: 3年間(製造業者データによる)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 【製造販売業者】

株式会社 TKB  
電話番号: 03-5762-3077

#### 【外国製造業者】

アールストローム ムンクショー ファールン AB社 \* \*  
(Ahlstrom-Munksjo Falun AB) \* \*  
スウェーデン王国

1804-15

お問い合わせ先



電話番号:  
**03-5762-7252**

1804-10000-4-FU (MKT)