

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 人工鼻 70570000

TKBニューモイスト 人工鼻

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 分泌物が溜まったときは、本品を交換してください。[分泌物過多の患者さんでない場合も本品に患者さんの分泌物が付着することにより、流量抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性があります。また、人工呼吸器との併用においては、呼吸回路に外れが生じた場合、低圧警報が作動しない可能性があります。]
2. 本品の使用前及び使用中に、呼吸回路等が正しく組み立てられ、各接続部が適切にしっかりと緩みなく接続されていることを常に確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正常な換気を妨げる可能性があります。]
3. 常に患者さんの状態及び本品の観察を行い、流量抵抗を確認してください。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、適切な換気が行えない可能性があります。]
4. 本品は24時間毎に交換してください。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、適切な換気が行えない可能性があります。]

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

1. 分泌物過多の患者さんには使用しないでください。[流量抵抗が上昇、あるいは閉塞の可能性があります。また、人工呼吸器との併用においては、呼吸回路に外れが生じた場合、低圧警報が作動しない可能性があります。]

＜併用医療機器＞(＜相互作用＞の項参照)


1. 本品はネプライザと併用しないでください。[本品が目詰まりを起こし、患者さんが呼吸困難を起こす可能性があります。]
2. 本品は加温加湿器と併用しないでください。[本品が閉塞し、換気が困難となる可能性があります。]

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

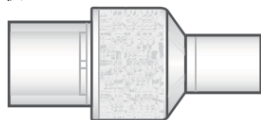

ハイドロサーム *



ハイドロサームマイクロ *

各コネクタのテーパ長は、ISO 5356-1に適合する。*

＜機能＞*

	ハイドロサーム	ハイドロサームマイクロ
最小一回換気量	>60mL	>8mL
最大一回換気量	1000mL	25mL
水分損失	@10mL @250mL	— 9.2mg/L —
水分出力	@10mL @250mL	— 29.5mg/L —
流量抵抗	@5L/min @10L/min @30L/min @60L/min	— — 0.3cmH ₂ O / 0.03kPa 0.8cmH ₂ O / 0.08kPa — —
漏れ	<5mL/min	<5mL/min
コンプライアンス	<1mL/kPa	<1mL/kPa
死腔量	20mL	2.2mL

＜作動・動作原理＞

本品を患者自身の呼吸が通過する際、本品のメンブレン(ハウジング内に備わるフィルタ膜)によって呼吸の熱及び水分を捕捉し、それらを吸気に還元することにより、吸気ガスを加温及び加湿します。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

患者の人工気道に沿って接続した場合等に、患者の呼吸の熱と水分を捕捉し、これらを利用して吸気ガスを加温及び加湿すること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用直前に本品に損傷がないことを確認し、包装を開封します。
*
2. 本品を呼吸回路Yピース部と気管チューブ(患者さん)の間に接続し、使用します。
3. 本品の最大使用時間は24時間です。*
4. 使用後は、適切な手順に基づき廃棄してください。*

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に水や薬液等の湿気を加えないでください。
2. 本品を使用することで呼吸回路に死腔が加わるため必要に応じて換気の補正を行ってください。
3. 他の製品と接続する場合には、その互換性、安全性を十分確認して使用してください。
4. 他の製品と接続する場合は、閉塞が起こらないよう十分に吸気・呼気回路が確保されることを確認して使用してください。
5. 着脱時は過度な力をかけたり、捻じったりしないでください。
6. 患者さんが体位を変更した場合には、本品の接続位置を変える必要があります。

【使用上の注意】

＜使用注意(次の患者には慎重に適用すること)＞

1. 喀痰が多く、脱水状態にある患者さんには使用しないでください。
2. 炭酸ガスが蓄積傾向にある患者さんには使用しないでください。

＜重要な基本的注意＞

1. 使用中は患者さんを注意深く観察してください。異常が見られる場合には、本品を取り外すか、新しい製品と交換してください。
2. 液体に浸けてすすいだり洗浄したりすることや、滅菌処理又は消毒剤の使用はしないでください。[本品の素材を損なう可能性があります。]
3. 保管中、未開封の本品の内部に水滴が生じる場合がありますが、メンブレンがパッケージ内の水蒸気を吸収することによって生じる現象です。使用上何も問題ありません。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）＞

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器 の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ネブライザ	人工鼻と併用しない こと。	本品が閉塞し、換気が困難と なる可能性がある。
加温加湿器	人工鼻と併用しない こと。	本品が閉塞し、換気が困難と なる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管
してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
3. 重ねて保管する場合、重みで本品が破損しないように配慮してくだ
さい。

＜有効期間＞ ＊ ＊

製品ラベル及び個別包装を参照してください。 ＊ ＊

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社TKB

電話番号：03-5762-3077

〔外国製造業者〕

インターサージカル社

（Intersurgical Limited）

英国

2208-6

お問い合わせ先



電話番号：

03-5762-7252

2208-1-0-MKT