

機械器具(06)呼吸補助器

管理医療機器 単回使用人工鼻用フィルタ 70572000(単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012) * *

「tkb Pneu-Moist人工鼻フィルタ」の付属品
コネクタ

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 本品の使用前及び使用中に、呼吸回路等が正しく組み立てられ、各接続部が緩みや外れが生じないようにしっかりと接続されていること及び吸引ポートのキャップがしっかりと閉じられていることを確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正しく換気されない可能性があります。]

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキシドガスによる滅菌品です。

＜形状＞(一例)

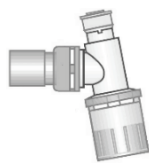

スィベルタイプ

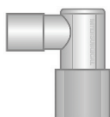

エルボータイプ

各コネクタのテーパ長はISO 5356-1に適合する。*

【使用目的又は効果】

呼吸回路等に接続し、気道の乾燥又は異物の侵入を防止するために用いること。

呼吸回路と気管内チューブ、人工鼻、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用直前に包装を開封します。
2. 包装を開封するときに刃物やはさみを使用する場合は、本品を破損させる可能性がありますので注意してください。
3. 本品を人工鼻若しくは呼吸回路Yピース部と気管チューブ(患者さん)の間に接続し、使用します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 他の製品と接続する場合には、その互換性、安全性を十分確認して使用してください。
2. 着脱時は過度な力をかけたり、捻ったりしないでください。
3. 本品を使用することで呼吸回路に死腔量が増えるため必要に応じて換気の補正を行ってください。
4. 患者さんが体位を変更した場合には、本品の向きや位置を変える必要があります。
5. 使用中は呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけてください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用中は患者さんを注意深く観察してください。異常が見られる場合には、本品を取り外すか、新しい製品と交換してください。
2. 推奨される使用期間は7日間前後です。使用状況により異なりますので、常に異常の有無を確認してください。
3. 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はありません。[自己認証による] * *

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
3. 重ねて保管する場合、重みで本品が破損しないように配慮してください。

＜有効期間＞

1. 滅菌有効期間 : 5年間[自己認証(当社データ)による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売者]

株式会社TKB

電話番号: 03-5762-3077

[外国製造業者]

インターサージカル社

(Intersurgical Limited)

英国

2407-4

販売元



株式会社 東機貿

2407-1-0-MKT