

機械器具(06)呼吸補助器
管理医療機器 麻酔回路セット 70567000 (呼吸回路セット 70566000)
「tkb Pneu-Moist呼吸回路セット」の付属品
ガスサンプリングライン

再使用禁止

【警告】

<使用方法>

1. 使用前及び使用中に、呼吸回路が正しく組み立てられ、各接続部が緩みや外れが生じないようにしっかりと接続されていることを確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正しく換気が行われない可能性があります。]
2. 患者さんに装着する前に、呼吸回路システムの圧力及びリークテストを行い、リークや閉塞がないことを確認してください。[安全で最適な換気の確認をします。]
3. 呼吸回路が患者さんの皮膚に触れないようにしてください。[患者さんが熱傷を負う可能性があります。]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止。
2. 可燃性麻酔剤と一緒に使用しないでください。[発火する危険性があります。]
3. チューブを引き伸ばしたり、絞ったりしないでください。[接続部の緩み、チューブの断裂を起こす可能性があります。]
4. 消毒・滅菌処理はしないでください。[収縮・破損等が生じる可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

<形状>



ガスサンプリングライン

<作動・動作原理>

本品は麻酔器又は人工呼吸器に接続し使用する単回使用の呼吸回路セットです。ガスを患者に供給し、患者からの呼気ガスを呼気システム又は大気に戻します。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、麻酔器又は人工呼吸器から患者へのガスの送込に用いる呼吸回路及び器具類である。
患者の呼気をサンプリングするためのチューブである。

【使用方法等】

<使用方法>

1. チューブラインの一端を麻酔器等に接続し、もう一端を呼吸回路のサンプリングポートに接続します。
2. 呼吸回路全体にリークがないことを確認します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 呼吸回路のコネクタを外すときは、チューブを引っ張らずに、コネクタ(接続部)を持って取り外しを行ってください。[チューブ、コネクタが破損する可能性があります。]
2. サンプリングポートを使用しない場合は、サンプリングポートのキャップを確実に閉めてください。
3. 包装を開封するときに刃物やはさみを使用する場合は、本品を破損させる可能性がありますので注意してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品及び患者さんに異常のないことを絶えず観察してください。異常が発見された場合には、患者さんに安全な状態を確保した上で使用を停止する等適切な処置を講じてください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

1. 水のかからない場所に保管してください。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、紫外線、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のない場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社TKB

電話番号: 03-5762-3077

[外国製造業者]

エンビセン社

(Shenzhen Envisen Industry Co Ltd)

中華人民共和国

2007-1

お問い合わせ先



電話番号:

03-5762-7252

2007-1-0-MKT