

機械器具(84)前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省令で定めるもの
管理医療機器 麻酔用マスク 35176000

tkb Pneu-Moistフェイスマスク(クアドラライトマスク)

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 本品を他製品と接続した後、正しく組み立てられ、各接続部が緩みや外れが生じないようにしっかりと接続されていることを確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正しく換気が行われない可能性があります。]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 消毒・滅菌処理はしないでください。[収縮・破損等が生じる可能性があります。]
3. 可燃性麻酔剤と一緒に使用しないでください。[発火する危険性があります。]

【形状・構造及び原理等】

＜組成＞

1. カフ: 熱可塑性エラストマー

＜形状＞



品番	サイズ番号	カラーコード	長さ×幅(mm)	コネクタサイズ
AC-Q1	1	グレー	79.4×59.5	15M
AC-Q2	2	ホワイト	93.7×70.5	22F
AC-Q3	3	イエロー	107.9×81.4	22F
AC-Q4	4	グリーン	123.0×92.6	22F

フックリングを付属(サイズ番号1を除く)

＜作動・動作原理＞

本品は、患者の鼻、口周辺部皮膚にマスクを密着させて、回路を介して供給された麻酔ガスあるいは酸素等を患者に供給する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、気道に麻酔ガス又は酸素等を供給するため、患者の鼻又は口に設置する器具である。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用直前に包装を開封します。
2. 接続部に麻酔回路、呼吸回路等を接続します。
3. マスクを顔に密着するように装着します。
4. 必要に応じて、ヘッドストラップをフックリングに掛けて、顔面に固定します。フックリングを使用しない場合は、外しておくこともできます。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 包装を開封するときに刃物やはさみを使用する場合は、本品を破損させる可能性がありますので注意してください。
2. 気道が開通していることを確認した上で、換気を行ってください。[麻酔ガス等が胃内に流入して、誤嚥を起こす可能性があります。]
3. 本品を顔面に固定した後、過度な圧力を与えないでください。[顔面や視神経に損傷を与える可能性があります。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 水のかからない場所に保管してください。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、紫外線、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のない場所に保管してください。

＜有効期間＞

1. 製品ラベル及び個別包装を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社TKB

電話番号: 03-5762-3077

〔外国製造業者〕

インターサージカル社
(Intersurgical Limited)
英国

2208-1

お問い合わせ先



電話番号:

03-5762-7252

2208-1-0-MKT