

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう (コード: 70897020)

DF ロック S

【形状・構造等及び原理等】

〔成分〕

性 状	粉末
成 分	硫酸カルシウム半水塩、着色料、その他

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業 サンエス石膏株式会社

HP: <http://www.san-esugypsum.co.jp>

*問い合わせ番号: 0120-351440

〔色 調〕 ブラウンイエロー

〔原 理〕 本材は水と練和することにより水和硬化する。

〔仕様〕

標準混水比	0.20
硬化時間	10分
線硬化膨張	0.08%
圧縮強さ	6.3MPa

(試験方法: JIS T 6600 による) (タイプ4)

(注)測定値は、弊社での代表的な値であり、規格値ではありません。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質化石こう。

【使用方法等】

- ①標準混水量は、本品粉末 100g に対し、水 20ml です。
練和及び流し込みに支障のない限り、混水量は少ない方が強度の高い表面滑沢な模型が得られます。
- ②練和は、30～60 秒間、均一になるまで行います。
- ③印象に注入します。印象に注入する際にバイブレーターを使用すると、より気泡の少ない美しい模型が得られます。
- ④注入後 40 分で模型を取り出せます。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ①本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- 2) 使用注意
- ①本材を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ②本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
- ③本材は、歯科用硬質石こうの用途以外に使用しないこと。
- ④本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ②開封後は、密封して保管すること。
- ③本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期限〕

本材は包装に記載の使用期限*までに使用すること。

※ (例) 20YY-MM は
使用期限 20YY年MM月 を示す)
〔記載の使用期限は当社データによる。〕